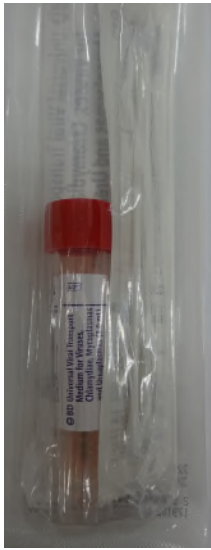



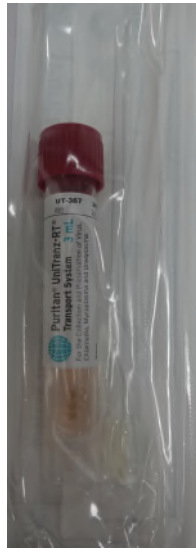


病毒拭子使用說明


一、背景：此次採購 20 萬(支)組病毒拭子，共有 4 種廠牌，分別為亞醫、帝博、康儀及艾康。共同特徵為採檢棒長於瓶身，採檢後需於折點將棒折斷，折斷後之棉棒會附著於蓋子(折斷後之棉棒會比瓶身稍長，鎖緊後，再次打開後，棉棒會附著於蓋子)。

廠商	新加坡必帝股份有限公司(經銷商：康儀股份有限公司)	亞醫醫學器材股份有限公司	帝博企業有限公司	艾康企業股份有限公司	
型號	220221	330C+519CS01	MW951S1ml	UT-306	UT-367
圖樣	一組採檢套組含一支傳送液及 2 根採檢棒 	一支傳送液及 1 根採檢棒 	一組採檢套組含一支傳送液及 1 根採檢棒 	一組採檢套組含支傳送液及 1 根採檢棒 	一組採檢套組含一支傳送液、1 根咽喉拭子及 1 根鼻咽拭子 


二、各廠牌使用說明：

(一)新加坡必帝股份有限公司(經銷商：康儀股份有限公司)圖解


一組採檢套組有 1 支傳送液，2 根相同之採檢棒(咽喉拭子)，採檢時使用一根採檢棒即可，另 1 根採檢棒備用。

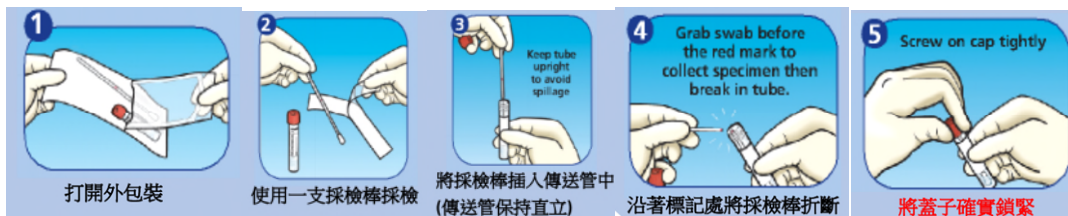

(二)亞醫醫學器材股份有限公司產品使用圖解

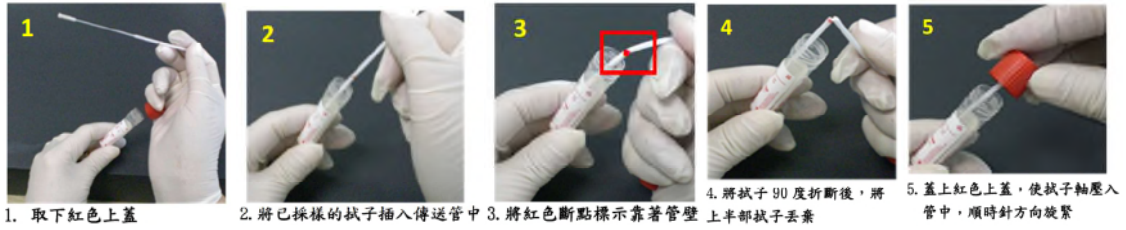


(三)帝博企業有限公司產品說明圖解

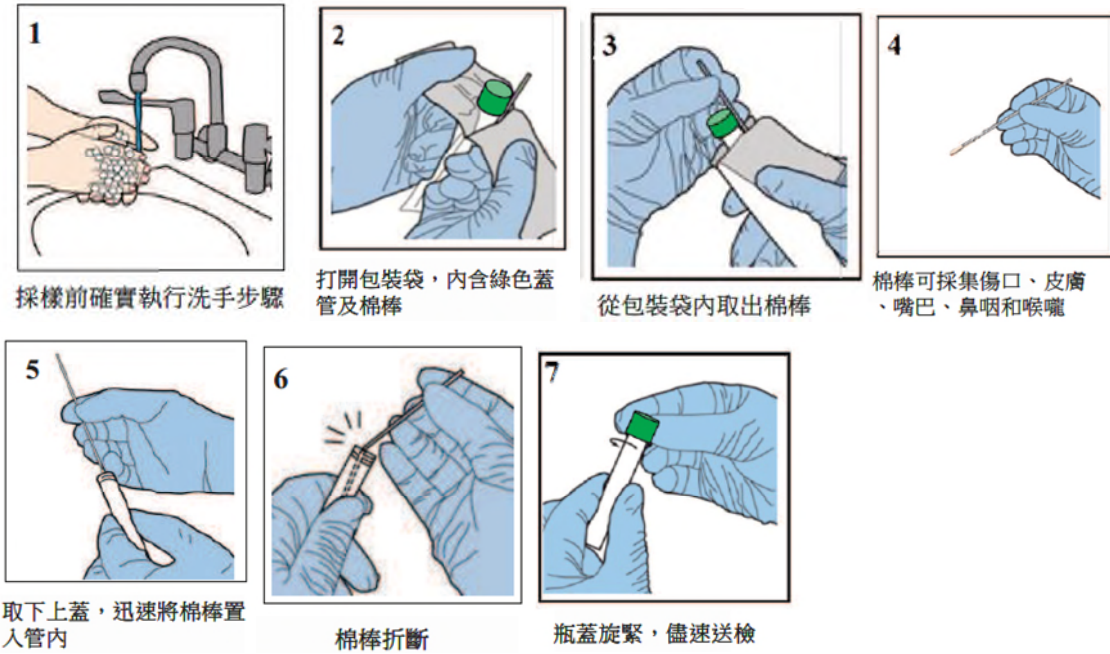



(四)艾康企業股份有限公司產品說明圖解

艾康有兩組產品，一組採檢套組(UT-367)有 1 支傳送液，2 根採檢棒(1 根為咽喉拭子，1 根為鼻咽拭子)，採檢時使用一根採檢棒即可，另 1 根採檢棒備用。另一組採檢套組(UT306)有 1 支傳送液，1 根採檢棒(咽喉拭子)。

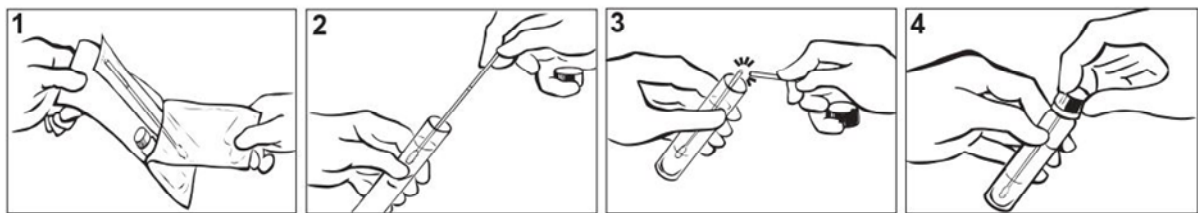

1. 打開包裝袋，內含傳送液管及 1 或 2 根採檢棒
2. 取出一根採檢後，將採檢棒插入傳送液
3. 在折點將採檢棒折斷
4. 瓶蓋旋緊，儘速送驗

三、錯誤樣態
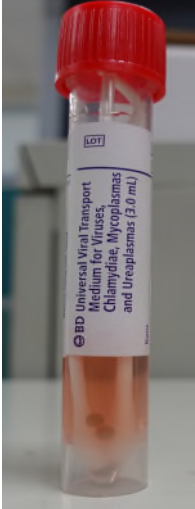
<p>樣態一 一管保存液放 2 根棉棒</p>	<p>樣態二 瓶蓋未懸緊</p>	<p>樣態三 運送時保存管倒置</p>
		
<p>樣態四 夾鏈袋內噴消毒劑(例如酒精、漂白水)</p>	<p>樣態五 夾鏈袋內放冰塊</p>	<p>樣態六 無保存液</p>
		