

BD™ Universal Viral Transport System 使用說明

● 產品介紹：

一組採檢套組有一支傳送液，兩根採檢棒，採檢時**採集一支採檢棒的檢體即可**，另一支採檢棒可供備用。採檢棒上有標記，方便使用者採檢完後可以將採檢棒折進傳送液中。



● 病毒檢體採檢套組使用方法：

1. 打開外包裝
2. 使用採檢棒採檢
3. 打開傳送液管的蓋子，將採檢棒插入傳送液管中(管子請保持直立)
4. 將採檢棒籤折線標記處靠著管口，沿著標記處將採檢棒折斷
5. 將傳送液管的蓋子**確實鎖緊**
6. 標記病人資訊

