




1. 取下紅色上蓋



2. 將已採樣的拭子插入傳送管中

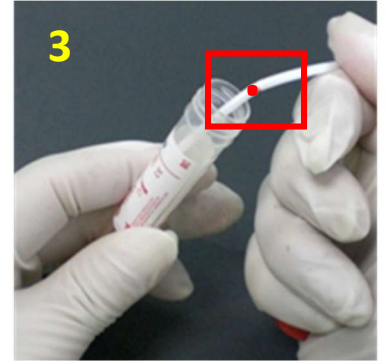

3. 將紅色斷點標示靠著管壁



4. 將拭子 90 度折斷後，將上半部拭子丟棄



5. 蓋上紅色上蓋，使拭子軸壓入管中，順時針方向旋緊



6. 側邊標籤標示受檢者資訊後，放入檢體傳送袋，盡速送達實驗室

傳送注意事項:

圖一：紅色上蓋正確旋緊



正確

圖二：紅色上蓋未正確旋緊



異常