


Σ-Virocult[®] 西格瑪-Virocult病毒拭子


Virus specimen transport For Molecular and Culture Techniques

採集病原菌容易捕獲且也容易釋放
病菌於液體輸送介質(培養基)內


產品符合美國臨床與實驗室標準機構 **CLSI M40-A** 標準

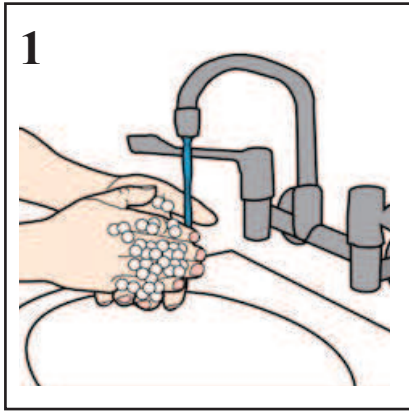


1 採樣前確實執行洗手步驟

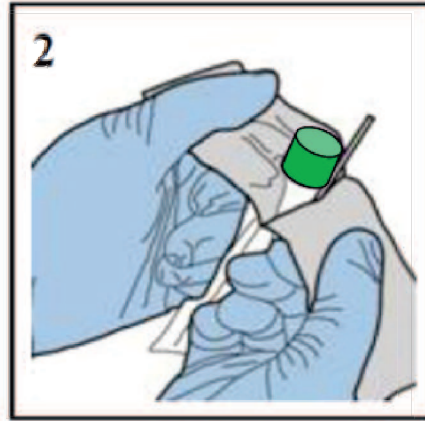


2 打開包裝袋，內含綠色蓋管及棉棒

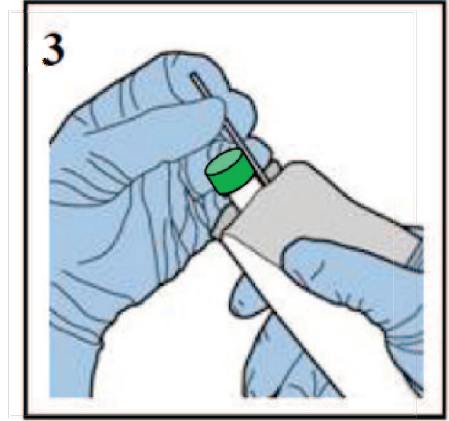


3 從包裝袋內取出棉棒

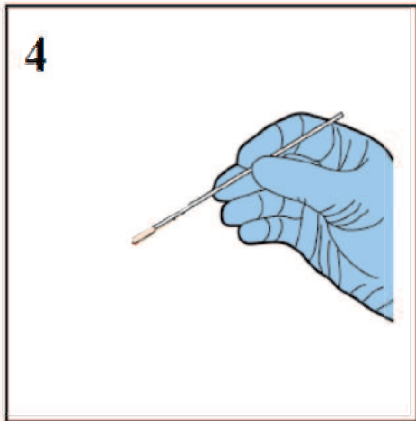


4 棉棒可採集傷口、皮膚、嘴巴、鼻咽和喉嚨

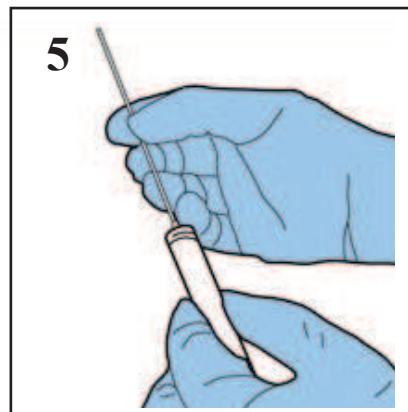

5 取下上蓋，迅速將棉棒置入管內

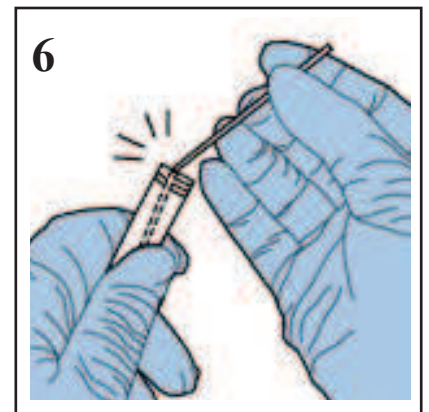

6 棉棒折斷

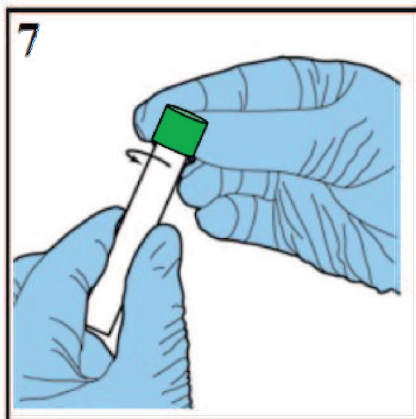

7 瓶蓋旋緊，儘速送檢



帝博企業有限公司 王景民0937-699-344
台南市東區自由路二段41號1F
電話：(06)2695868、2695878
E-mail：dybo24290916@gmail.com